

**FINNISH** KERTAKÄYTTÖINEN HENGITYKSENSUOJAIN CE  
Disposable surgical mask type I

Brandi: HPDOVE

EU

Malli / Model Kertakäyttöinen kirurginen hengityssuojain TYPEI

FIN

Tuotteen nimi:

Kuvaus: Hengityssuojain koostuu useasta kerroksesta ja on tarkoitettu Kertakäyttöön. Ulompi ja sisempi kerros on valmistettu kuitukankaasta ja välikerros sulatetuista tekstiileistä.

Suojaintyyppi Kertakäyttöinen hengitys suojain

Määrä: 50kpl rasiassa

Sovellettu : EN14683:2019+AC:2019€

Viittaus as 92/42/EEC

Rekisteröinti RPS/439/2020, R20200402, 04/APR/2020

Valmistusp Katso tuotepakkauksesta

Säilytysaika 2-vuotta valmistuspäivämäärästä.

Käyttö: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi suojelemaan väestöä mikro-organismeilta ja pieniltä hiukkasilta. Vain kertakäyttöön, ei steriili.

Varoitus: 1. Tuotetta ei tule käyttää ympäristössä, joissa on haitallisia kaasuja tai höyryjä tai hapen puutetta eikä vedenalaisessa ympäristössä.  
2. Älä käytä avoimen liekin läheisyydessä (kuten hitsauksen, muovauksen jne. aikana.)  
3. Hengityksen suojaimen käyttö ei poista tartuntariskiä  
4. Tuotteen käytön laiminlyönti voi johtaa sairauteen.  
5. Käytä tuote kahden vuoden sisällä valmistuspäivämäärästä  
6. Älä käytä, jos pakkaus vaurioitunut.

HUOMAA: 1. Tarkista hengityksensuojaimen ulkonäkö ennen käyttöä. Älä käytä sitä, jos huomaat, vaurioita, öljytahroja tai hajuja.  
2. Jos koet hengenahdistusta, huimausta tai muuta epämukavuutta, poistu saatuneelta alueelta välittömästi.  
3. Vaihda hengityssuojain heti uuteen, jos sinusta tuntuu, että hengittäminen on vakavaa.

SÄILYTYS: 1. Varastoitava asianmukaisesti saastuneiden alueiden ulkopuolella.  
2. Vältä mekaanista räsytystä, kosteutta, korkeaa lämpötilaa, auringonpaistetta, ja kosketusta syövyttävien kemikaalien kanssa.  
3. Säilytys -20-38 C:n lämpötilassa suhteellisen kosteuden ollessa <80%.

VALMISTA Ningbo HPDOVE DENTAL INSTRUMENTS CO.,LTD

ADD:No.588 Xiaolin Road, Xiaolin Town, Cixi City, Zhejiang Province, China

Tel: +86 574 63519178

EMAIL: rebecca@hpdove.com

[www.hpdove.com](http://www.hpdove.com)

TESTAAJA: MDST testattu ja CE- hyväksytty standardin EN149:2001+A1:2009 mukaisesti.

Zhejiang institute of medical device supervision and testing, CFDA

Raportti nro: Z20201298

Hyväksytty testi 29.5.2020

Säilytä tämä ohje huolellisesti.

**CE-SERTIFIKAATIN MYÖNTÄJÄ:**

Riomavix

S.L.

Calle de

Almansa

55, 1D,

Madrid

28039

Spain

**KÄYTTÖOHJE**

**Suu- ja nenäsuojain, I. ”kirurginen maski”**

**Valmistaja**

**Tuotenumero**

**Käyttöohje:**

1. Varmista, että suojain on ollut säilytettynä oikein kuivassa ja lialta suojassa
2. Pese kätesi huolellisesti saippualla ennen suojaimen päähän asettamista
3. Aseta suojain sekä suun, että nenän yli ja muotoile nenäkehys oman nenäsi mukaisesti.

Varmista, että suojaimen ja kasvojen välissä ei ole näkyviä rakoja

4. Vältä koskemasta suojainta ulkona liikkeessäsi.

Mikäli sinun pitää esimerkiksi korjata suojaimen asentoa tai raapia nenääsi maskin alla, pese kätesi tai käytä käsidesiä ensin

5. Poista suojain korva- tai päälennkien kautta, älä koske itse kasvosuojukseen.
6. Mikäli kyseessä on kertakäyttöinen henkilösuojain, heitä se välittömästi roskiin
7. Pese kätesi huolellisesti

Maahantuojaja: Huippu Group Oy

Laakeritie 7, 90620 OULU

Y-tunnus: 2085791-7

Puh. +358504414539 7 +358504904065

**MERKKIEN SELITYKSET RUMMERINGAR KOMMENTAR**



Ei uudelleenkäytettävä Huomio, katso käyttö-ohjeet ennen käyttöä  
Kan inte återanvändas Observera, se bruksanvisningen före användning



Älä käytä, jos pakkaus Katso valmistajan toimittamat tiedot  
Använd inte om paketet Se information från tillverkaren



Säilytyslämpötila Varastointiolosuhteiden suurin suhteellinen  
Förvaringstemperatur kosteus  
Maximal relativ luftfuktighet för  
lagringsförhållandena

#### SWEDISH

Tuoren engångskirurgisk mask typ I

Brandi: HPDOVE

EU

Modell: Engångs kirurgisk mask typ I

SWE

Produktnamn:

Andningskyddet består av flera lager och är avsett för engångsbruk. Det yttre och inre lagret är tillverkade av nonwoven-tyg och mellanlagret av smältblåst tyg.

Typ av andningskydd för engångsbruk.

Kvantitet: 50st förpackning

Tillämpad EN14683:2019+AC:2019

Förordning 92/42/EEC

Registrering RPS/439/2020, R20200402, 04/APR/2020

Förvaringstid Two år från tillverkningsdatumet.

Användning Produkten är avsedd att bäras för att skydda allmänheten mot mikroorganismer och små partiklar. Endast för engångsbruk. Ej steril.

Varningar: 1. Produkten bör inte användas i miljöer med skadliga gaser eller ångor, syrebrist eller under vatten.

2. Använd inte i närheten av öppen eld (såsom vid svetsning, formning osv.).

3. Användning av andningsskydd eliminerar inte risken för att smittas av en sjukdom eller infektion.
4. Underlåtenhet att använda och underhåll produkten enligt anvisningarna kan resultera i sjukdom.
5. Använd produkten inom två år från tillverkningsdatumet.
6. Använd inte om förpackningen är skadad.

- OBSERVERA
1. Kontrollera andningsskyddet utseende innan användning. Använd det inte om du lägger märket till skador, oljefläckar eller lukter.
  2. Om du upplever andnöd och yrsel eller annat obehag, vänligen lämnä det kontaminerade området genast.
  3. Byt genast ut andningsskyddet mot ett nytt om du känner att det blir svårare att andas.

- FÖRVARING
1. Måste förvaras korrekt utanför förorenade områden.
  2. Undvik mekanisk belastning, fukt, hög temperatur, solsken och kontakt med frätande kemikalier.
  3. Vi rekommenderar att produkten förvaras i -20-38 °C med en relativ luftfuktighet på <80 %.

TILVERKARE  
Ningbo HPDOVE DENTAL INSTRUMENTS CO.,LTD  
ADD:No.588 Xiaolin Road, Xiaolin Town, Cixi City, Zhejiang Province, China  
Tel: +86 574 63519178  
EMAIL: rebecca@hpdove.com  
[www.hpdove.com](http://www.hpdove.com)

TESTLABOR  
Testrapport utfärdas av EN149:2001+A1:2009 -standarden  
Zhejiang institute of medical device supervision and testing, CFDA  
Rapportnummer: Z20201298  
Godkänt test: 29.5,2020  
Förvara denna bruksanvisning.

UTGIVARE AV CE-CERTIFIKAT:

Riomavix  
S.L.  
Calle de  
Almansa  
55, 1D,  
Madrid  
28039  
Spain

BRUKSANVISNING  
**Mun- och nässkydd**  
**Tillverkare**  
**produktnummer**

1. Se till att skyddet har lagrats ordentligt på en torr och smutsfri plats

2. Tvätta händerna noggrant med tvål innan du tar på locket
3. Placera skyddet över både munnen och näsan och forma näsramen enligt din egen näsa. Se till att det inte finns några synliga mellanrum mellan skölden och ansiktet
4. Undvik att vidröra skyddet när du rör dig utomhus.  
Om du till exempel behöver korrigera skyddet eller skrapa näsan under masken, tvätta händerna eller använd handskar först
5. Ta bort locket genom öron- eller huvudöglorna, rör inte själv i ansiktsskyddet.
6. För personlig skyddsutrustning, kassera den omedelbart
7. Tvätta händerna ordentligt

Importör: Huippu Group Oy

Laakeritie 7, 90620 OULU

Affärs-ID: 2085791-7

Puh. +358504414539 7 +358504904065